

1.10. Nahakaabe, küünekaabe, juuksed

1.10.1. Vahendid

1.10.1.1. Proovinõu mikrobioloogiliseks ja uuringuks - steriilne tampoon ja söötmega katsuti;

1.10.1.2. Naha-ja küünekaape uuringuks tume paber ja prooviümbrik.

1.10.2. Protseduuri teostamine ja materjali kogumine

- 1) MRSA kandluse ja pärmseente analüüsiks võtta proov nahalt steriilse tampooniga ning suruda tampoon transportsöötmega katsutisse.
- 2) Dermatofüütide mikrobioloogilise külvi jaoks koguda materjali terve ja kahjustatud naha alade piirilt steriilse nüri skalpelliga kaapeid tehes. Küüs lõigata nii kaugelt kui võimalik. Paksenenud küüne puhul teha steriilse nüri skalpelliga kaapeid küüne alt ja/või küünevalli piirkonnast. Juukseid koguda kahjustuskoldest pintsettidega kitkudes. Kreeme, puudreid ja ravimeid kahjustuskohal vahetult enne proovivõttu mitte kasutada.
- 3) Võetud materjal voltida tumedamasse paberisse ning asetada prooviümbrikusse.